

## Ficha técnica

### Máscara Descartável MC301



#### CATEGORIA DA MÁSCARA:

Nível 2, de uso único, destinada à utilização por indivíduos no contexto da sua atividade profissional, ou nas saídas autorizadas em contexto de confinamento, nomeadamente em espaços interiores com múltiplas pessoas.

#### INSTRUÇÕES DE USO:

Esta máscara deverá ser utilizada como complemento das medidas de proteção e higienização recomendadas e das regras de distanciamento social, fundamentais para controlo da COVID-19.

Para mais informação, consultar: <https://covid19.min-saude.pt>

Recomenda-se o cumprimento da Orientação da DGS (nº 019/2020 de 03/04/2020) para o uso correto da máscara:

- Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes de colocar a máscara;
- Colocação da máscara com a face interna de cor branca virada para a cara, e a face externa de cor azul virada para fora;
- Ajuste da máscara, cobrindo a boca, o nariz e o queixo com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;
- Não deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, deve ser feita imediatamente uma higienização das mãos;
- Recomenda-se uma utilização de cada máscara por um período máximo de 4h por dia, devendo a máscara ser substituída por outra nova no final desse período ou assim que se encontre húmida. A máscara retirada deve ser nos depósitos de lixo comum;
- Se acidentalmente molhar a máscara, deverá trocá-la por outra nova;

g) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da máscara), segurando nos elásticos;

h) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização e manuseamento da máscara.

#### CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

- A proteção da máscara só é garantida se respeitar a conservação indicada:
  - Armazenar em local seco com humidade inferior a 60%;
  - A temperatura deverá ser entre os 10°C e 40°C.


#### VIDA ÚTIL:

A máscara é de uso único. Não reutilize este dispositivo.

#### LIMITAÇÕES AO USO:

Este dispositivo não é um dispositivo médico. Não cumpre o regulamento das máscaras cirúrgicas (regulamento UE/2017/745).

#### COLOCAÇÃO E RETIRADA DA MÁSCARA:

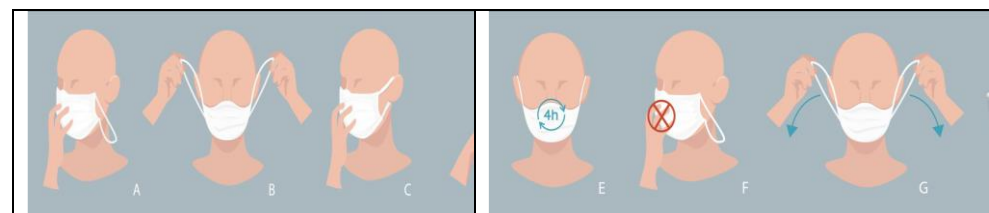

#### COMPOSIÇÃO:

##### Polipropileno

Duas camadas de tecido TNT de 25g/m<sup>2</sup>

Uma camada filtrante de TNT de 25g/m<sup>2</sup>

Medidas:

Comprimento: 17,5cm

Altura: 9,5cm

Processo fabrico: Automático

Corte automático.

Confeção: Termo soldagem.

Clipe metálico na parte superior.

Elástico com 3mm para prender às orelhas.

#### FABRICANTE:

TAGI, LDA

Estrada N.366

2050-145 Aveiras de Cima

#### Tamanho: Único (adulto)

